

Heyrnartæki með hlustarstykki



1. Hljóðnemaop með vind- og veðravörn
2. Kerfishnappur
3. Lok fyrir kerfisstillingar
4. Styrkstillir
5. Rafhlöðuhólf sem einnig er rofi til að kveikja og slökkva á tækinu
6. Bogi
7. Sérsmíðað hlustarstykki
8. Vind og veðurhlíf (vatnsfráhrindandi) fyrir rafhlöðuhólf.

Naída Ultra Powerer vatnsfráhrindandi!

Hús Naída er vatnsfráhrindandi og því þola tækin notkunn við fleiri aðstæður en áður, svo sem erfiðisvinnu, íþróttir, útiveru og þegar óvænt fer að rigna. Til að tækið þoli vatn, svita og óhreinindi við fyrrgreinadar aðstæður þarf að hafa eftirfarandi í huga:


- Rafhlöðuhólfið og kerfishnappsvörnin þurfa að vera lokað.
- Allar þrjár vind- og veðurhlífarnar þurfa að vera rétt settar á.
- Farið sé eftir leibiningum um notkun tækisins.
- Ekki má vera með heyrnartækið í sturtu eða við hárfvott.
- Ekki má nota heyrnartækið í vatni. Það er ekki gert fyrir sund eða dýfingar.
- Naída er ekki hannað til þess að geta verið á kafi í vatni.
- Þegar heyrnartækið hefur verið í snertingu við vatn eða svita þarf að þrifa það.
- Rétt notkun og umhirða heyrnartækisins lengir líftímann.

Skipt um rafhlöðu:

Notið rafhlöðu nr. 675 í UP tæki (blá pakkning)


En rafhlöðu nr. 13 í SP tæki (appelsínugul pakkning)

Settu nýju rafhlöðuna í með + hliðina (flötu hliðina) á móti + merkinu í rafhlöðuhólfinu og lokaðu. Þú getur einnig séð hvernig rafhlaðan á að snúa inni í rafhlöðuhólfinu.

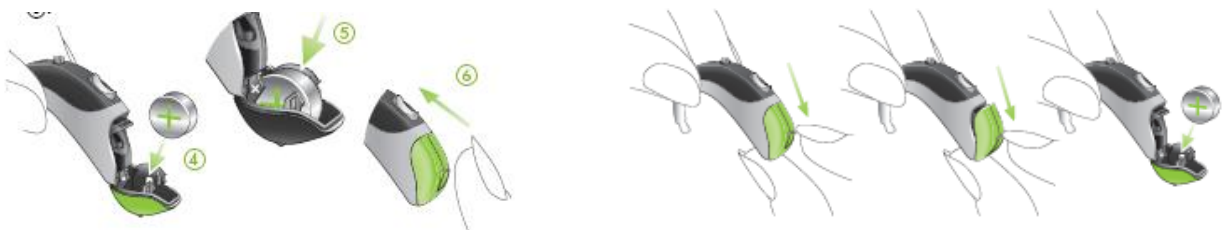


Heyrnartækið sett í:

Notaðu þá hendi sem er sömu megin og eyrað sem heyrnartækið á að fara í. Taktu um tappann milli þumalfingurs og vísifingurs.

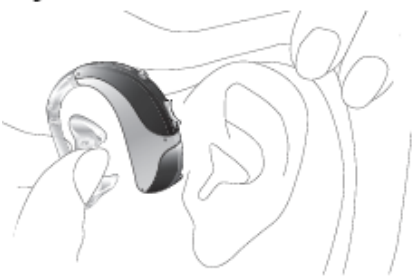

Lyftu hendinni að eyranu og passaðu að hlustarstykkið snúi að hlustinni.

Settu hlustarstykkið í hlustina. Ef það reynist erfitt að koma því fyrir getur verið gott að toga eyrað aðeins aftur og upp um leið og stykkinu er komið fyrir.

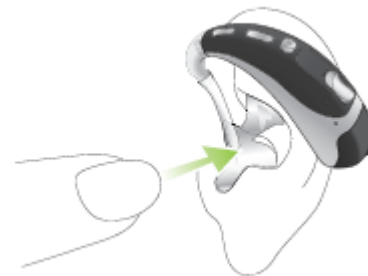

Settu nú heyrnartækið bak við eyrað. Passaðu að ekki snúist upp á slönguna. Til að taka tækið úr eyranu skaltu taka um hlustarstykkið – ekki slönguna – og toga það varlega úr eyranu.

Styrkstillir:

Hægt er að hækka eða lækka hljóðið í tækinu með styrkstilli. Til að hækka er ýtt upp á við en til að lækka er ýtt niður á við.

Athugið! Píp hljóð gefur til kynna að styrkstillirinn sé virkur, tvö píp að ekki sé hægt að hækka meira í tækinu.

Ef þú vilt ekki nota styrkstillinn getur heyrnarfræði gert hann óvirkan.

Einnig er hægt að stilla styrkinn með myPilot fjarstýringu.



Hlustunarkerfi

Sjálfvirkt val á milli kerfa

Náíða stillist sjálfvirkt eftir mismunandi hljóðumhverfi.

Val á fleiri kerfum


Heyrnarfræðingur getur sett inn fleiri einstaklingsbundin kerfi fyrir þig. Það getur verið kerfi fyrir sérstakar hlustunaraðstæður eða tónmöskvakerfi. Þú hefur aðgang að mismunandi kerfum með fjarstýringunni eða kerfishnappnum.

Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirks kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirka kerfinu.

Tækin eru með innbyggðri sjálfvirkri samstillingu til að aðlaga hljóðstyrk og skiptingu milli kerfa í tækjunum. Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins.

Fínstilling:

Hægt er að fínstilla hljóðstyrkinn með styrkstillinum á heyrnartækinu eða með fjarstýringu.

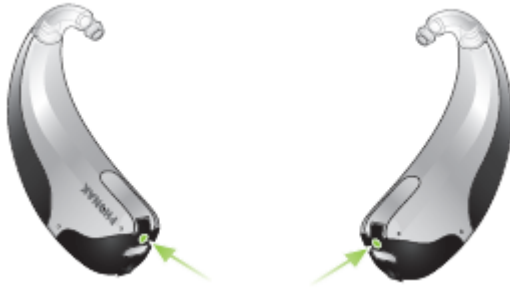

Blátt = vinstra

Rautt = hægra

Vind og veðravörn

Á tækjunum er vind og veðravörn til að verja hátalarana og rafhlöðuhólfið frá ryki, raka og vatni.

Endingin á hlífunum getur verið upp að nokkrum mánuðum en það fer eftir umhverfinu. Gott er að venja sig á að skipta reglulega um hlífarnar, svo sem eins og einu sinni í mánuði.

Skítugar hlífar hafa áhrif á hljómgæðin í tækjunum, skilningur í hávaða getur minnkað, hljóðið getur orðið almennt lægra ofl. Með tímanum lærist hve oft þarf að skipta um hlífar.

Fyrir börn er ráðlagt að skipta um einu sinni í mánuði.



Mikilvægt!

1. Notið alltaf rafhlöður númer 675. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til Heyrnar- og talmeinstöðvarinnar.
2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þorni.
3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurr áður en þú lokar öskjunni.
4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða að synda. Ekki geyma heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður hafðu þá samband við Heyrnar- og talmeinstöðina. Ef þú er með fjarstýringu við tækin mundu þá eftir að taka hana með ásamt heyrnartækjunum.