


Widex RC3-1 fjarstýring

RC3-1 fjarstýring er lítil tölva með upplýsingum fyrir mismunandi heyrnartækjakerfi. Í henni er einnig sendir sem sendir boð til heyrnartækisins. Heyrnartæki og fjarstýringin þurfa ekki að vera í sjónlínu við hvort annað. Drægni fjarstýringarinnar er um 1 metri.

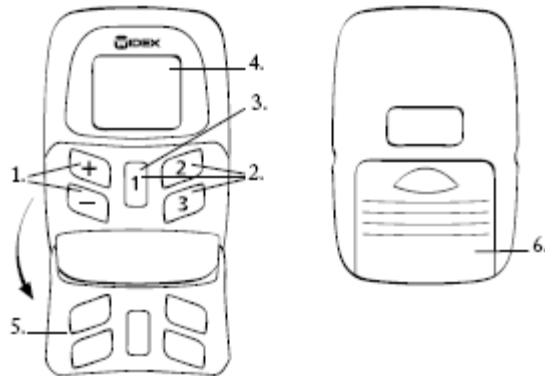


1. **Styrkstillir.** [+] og [-] takinn eru notaðir til að hækka eða lækka.
2. **Kerfis val.** Takkar [1], [2] og [3] eru notaðir til að stilla á mismunandi kerfi. Hægt er að hafa allt að þrjú kerfi í RC3-1 fjarstýringunni.
3. **Kveikt/slökkt.** Takki [1] er notaður til að kveikja á fjarstýringunni. Hann er einnig notaður til að setja tækið á grunnstillingu: P1 V9
4. **Skjár.** Hér sérst hvaða kerfi hefur verið valið (P), styrkur (V) og staða á rafhlöðu fjarstýringarinnara.
5. **Gegnsæ vörn** fyrir takkaborðið með götum fyrir takkana. Þegar lokið er á dregur það úr hættu á að ýtt sé óvart á takkana. Hægt er að hafa varnarlokið opið, þannig verður fjarstýringin lengri og auðveldara að nota hana.
6. **Rafhlöðulok.**

Tegund rafhlöðu:

Mælt er með að nota Lithium **CR 2032** rafhlöður. Í fjarstýringuna þarf tvær rafhlöður.

Rafhlöður settar í .

Plúsmerkið (+) á rafhlöðunni á að snúa upp þegar rafhlaðan er sett í.

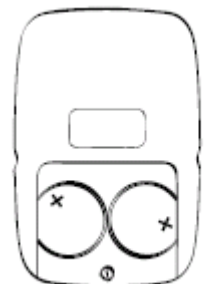

Skipt um rafhlöðu




Skiptið ávallt um báðar rafhlöðurnar í einu. Á skjánum sést staðan á rafhlöðunum. Þegar rafhlaðan er nánast búin mun þetta merki lýsa stöðugt á skjánum. Ef þetta merki kemur aðeins stutta stund er ekki ástæða til að skipta um rafhlöðu.

Kveikt og slökkt á fjarstýringunni

Haldið takk [1] niðri í um ½ sekúndu

Þegar kveikt er á fjarstýringunni getur þú sett á upphafstillinguna P1 V9 með því að ýta á [1] í um það bil 2 sekúndur.

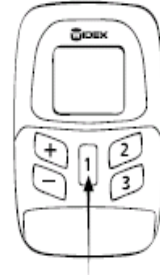


Styrkurinn

Með [+] [-] getur þú hækkað eða lækkað í tækinu í 13 þrepum. Lágmark er 0 en þá heyrir ekkert í tækinu og hámark er 13. Venjuleg stilling er alltaf 9 og það er stillingin sem fjarstýringin breytir á. Ef þú hefur t.d. valið hlustunarkerfi 2 og hljóðstyrk 6 og skiptist síðan yfir á annað hlustunarkerfi fer hljóðstyrkurinn sjálfvirkt á 9.



Hlustunarkerfi

Hægt er að velja á milli allt að þriggja hlustunarkerfa með fjarstýringunni. Kerfin eru sett inn í fjarstýringuna í samráði við heyrnarfræðinginn en þeim má alltaf breyta síðar ef þörf er á. Skipt er á milli kerfa með því að nota takka [1], [2] eða [3]. Númerið við hliðina á P á skjánum sýnir á hvaða kerfi tækið er. Þá heyrir þú einnig hljóð sem gefa til kynna á hvaða kerfi þú ert að stilla.

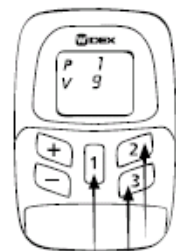

- Kerfi 1: Eitt stutt píp
- Kerfi 2: Tvö stutt píp
- Kerfi 3: Þrjú stutt píp.

Kerfi	Kerfisnafn í heyrnartæki	Athugasemdir
1.		
2.		
3.		