

Centra – Cielo Active heyrnartæki frá Siemens



1. Hátalaraslanga
2. Kúpull
3. Hlíf yfir hljóðnema
4. Hleðslunemi
5. Rafhlöðuhólf
6. Merghlíf (C-Guard)

Hægri = rautt
Vinstri = blátt


Athugið!

- Notið alltaf kúpul á hátalarann.
- Gangið úr skugga um að kúpullinn sé vel settur á hátalarann.
- Ef kúpullinn verður eftir inn í eyranu, fáið háls-nef og eyrnarlækni til að fjarlægja hann.
- Skiptið um kúpul ef hann rifnar eða brotnar.
- Setjið hátalarann með kúplinum varlega, og ekki of langt, inn í eyrað.

Haldið hátalaranum með kúplinum milli þumalfingurs og vísifingurs og setjið varlega inn í hlustina. Það getur verið auðveldara að toga eyrað upp á við um leið.



Settu heyrnartækið bak við eyrað og kveiktu á því með því að loka rafhlöðuhólfinu.

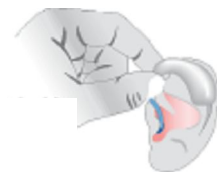

Til að taka heyrnartækið af þér haltu utan um hátalaraslönguna með þumalfingri og vísifingri og dragið varlega út.

Skipt um rafhlöðu:

- Þú getur notað hvort sem er venjulegar rafhlöður eða endurhlaðanlegar rafhlöður í Centra/Cielo Active heyrnartækið.
- Notið alltaf rafhlöðu númer 13, appelsínugult.
- Ef þú notar endurhlaðanlegar rafhlöður þarf að byrja á því að hlaða þær fyrir notkun.
- Ef þú notar venjulegar rafhlöður, taktu miðann af áður en þú setur rafhlöðuna í tækið og láttu hliðina sem miðinn var á snúa upp.



Rafhlaða sett í:

Opnaðu rafhlöðuhólfið með fingurnöglinni eins og sýnt er á teikningunni.



Kúpullinn er með innbyggðri merghlíf (C-Guard). Eyrnamerg sem sest hefur utan á kúpulinn má auðveldlega þurrka af með mjúkum klút.



Mælt er með því að skipta um kúpulinn ásamt merghlífinni á þriggja mánaða fresti eða eftir þörfum.



Hreinsun:

Eyrnamergur á kúplinum eða mergsúnni getur haft áhrif á gæði hljóðsins. Ef mergur hefur safnast fyrir er auðvelt að þrifa hann af með mjúkum klút.

Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins. Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.



Leiðbeiningar um þrif:

Þrífið kúpulinn með mjúkum klút. Ekki þarf önnur áhöld.


Skipt um kúpul:

Haltu um hátalarann með annarri hendi milli þumalfingurs og vísifingurs. Takið síðan kúpulinn af.

Setjið kúpulinn á hljóðnemann. Merkingarnar hjálpa þér að setja hann rétt á.

Athugið!

- Notið aldrei bursta eða oddhvassa hluti við hreinsun á kúplinum. Það getur skemmt kúpulinn eða merghlífina.
- Notið aldrei rennandi vatn né bleytið heyrnartækið.
- Þrífið eftir þörfum með mjúkum klút.

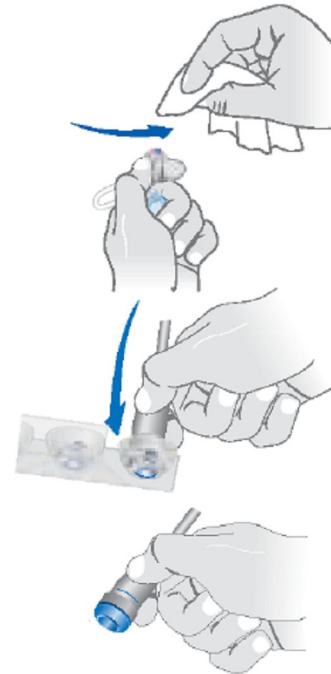

Er tækið bilað?

Einkenni	Ástæður	Lausnir
Hljóðið er veikt:	Léleg eða ónýtt rafhlaða Tækið er stíflað. Hljóð of lágt stillt. Kúpulinn er stíflaður af eyrnamergr eða óhreindum. Hljóðnemahlíf stífluð.	Settu í nýja rafhlöðu eða settu í hleðslu endurhlaðanlega rafhlöðu Hreinsaðu eða skiptu um kúpul. Skiptu um kúpul. Skiptu um hljóðnemahlíf.
Tækið flautar:	Situr ekki rétt í eyranu. Hljóðstilling of há. Tækið stíflað af eyrnamergr eða eyrnamergrur í hlust. Rafhlöðuhólf ekki vel lokað. Léleg rafhlaða.	Komið tækinu betur fyrir í hlustinni Lækkið með fjarstýringunni. Hreinsið odd kúpulsins eða hafið samband við Heyrnar- og talmeinstöð. Lokið rafhlöðuhólfinu. Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu.
Hljóðið er óhreint:	Hljóðstilling of há Léleg rafhlaða	Lækkið hljóðið með fjarstýringu. Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu.
Tækið er dautt:	Ekki er kveikt á tækinu. Rafhlöðuhólf ekki vel lokað. Rafhlaða dauð. Rafhlaðan snýr öfugt í tækinu.	Kveikið á tækinu. Lokið rafhlöðuhólfinu. Hlaðið eða skiptið um rafhlöðu, setjið rafhlöðuna rétt í tækið.