

Phonak leiðbeiningar um pörun við síma



Þráðlaus tenging milli
heyrnartækja og snjallsíma

iPhone

1. Á iPhone forsiðu velur þú "Stillingar" "Settings".
2. Veldu tengistillingar með því að ýta á "Bluetooth" táknið.
3. Tryggðu að kveikt sé á Bluetooth (kveikja á rofa fyrir Bluetooth).
4. Endurræstu heyrnartækin*. Ef tæki með hleðslurafhlöðum, slökktu og kveiktu aftur með hnappnum á tækinu (takka haldið niðri 3-4 sek)
5. Nú birtist nafnið á heyrnartækjunum á skermi símans - getur tekið stutta stund. Veldu tækin með því að ýta á nafnið.
6. Stutt staðfestingar-píp heyrst í þöruðu heyrnartækjunum.
7. iPhone síminn þinn er nú tengdur við heyrnartækin.

ATHUGIÐ!

Ef eitt heyrnartæki er tengt við símann er hitt heyrnartækið sjálfkrafa tengt líka.

Android

1. Á Android forsiðu velur þú "Stillingar" "Settings".
2. Veldu tengistillingar með því að ýta á "Bluetooth" táknið.
3. Tryggðu að kveikt sé á Bluetooth (kveikja á rofa fyrir Bluetooth).
4. Endurræstu heyrnartækin*. Ef tæki með hleðslurafhlöðum, slökktu og kveiktu aftur með hnappnum á tækinu (takka haldið niðri 3-4 sek)
5. Nú birtist nafnið á heyrnartækjunum á skermi símans - getur tekið stutta stund. Veldu tækin með því að ýta á nafnið.
6. Þú munt heyra skilaboð, "Bluetooth Pairing confirmed". Ýttu á "Ljúka/Para".
7. Stutt staðfestingar-píp heyrst í þöruðu heyrnartækjunum.
8. Android síminn þinn er nú tengdur við heyrnartækin.

*Gildir um Phonak Marvel og Paradise heyrnartæki.

life is on

Við hjá Phonak trúum því að góð heyrn veiti aukin lífsgæði og sé nauðsynleg til að geta lifað lífinu án takmarkana. Í yfir 70 ár höfum við starfað af ástríðu til að skapa heim þar sem "life is on" fyrir alla okkar viðskiptavini. Háþróaðar heyrnarlausnir okkar eru hannaðar fyrir fólk á öllum aldri og með allar tegundir heyrnarskerðingar með það að markmiði að allir taki þátt, félagslega og líði betur á sál og líkama.

www.phonak.com/dk/da